

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ClearX АЛАЙНЕРИТЕ?

ClearX са поредица от прозрачни алайнери, произведени посредством 4D технология. С 1 шина за 3 седмици получавате 3 различни форми. Когато завърши първата седмица от лечението, променяме формата с помощта на бустъра, за да преминем към следващата стъпка от лечението.

След 3 седмици ще преминем към втората шина от комплекта и т.н.

ClearX има множество предимства както за лекаря и пациента, така и за нашата планета.

3 Форми
3 Седмици
1 Алайнер



Нашата цел е да намалим употребата на пластмаса, като същевременно използваме всички предимства на модерната ортодонтия, за да надскочим досега познатите граници в лечението с алайнери.



CLEAR X



КАК РАБОТИ БУСТЪР УСТРОЙСТВОТО

СТЪПКА 1 СВАЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Сканирайте QR кода или потърсете ClearX в Apple AppStore или Google Play, за да свалите приложението.



СТЪПКА 2 ДЕН ЗА БУСТВАНЕ ЛИ Е?

Свържете бустър устройството с мобилното приложение.

Уверете се, че са включени блутуут, местоположение и известия



Налейте вода в бустъра и го включете на подгряване

СТЪПКА 3 БУСТНЕТЕ АЛАЙНЕРА

Сложете алайнера в бустър устройството като използвате пинсетите



Активирайте бустването

BOOST



Видео с инструкции

Сканирай ме!

ПРЕДИМСТВА

на ClearX пред конвенционалните системи



ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ



КРАТКОСРОЧНО
ЛЕЧЕНИЕ



ПО-БЕЗБОЛЕЗНЕНО
поставяне на новата шина



ПО-МАЛКО
АЛАЙНЕРИ

се изработват за всяко
лечение



ПО-МАЛКО
ПЛАСТМАСА

РЕЗУЛТАТИ



Лечението е възможно във всяка възраст, но е по-специално насочено към тийнейджъри и възрастни. Подходящо е и за пациенти, които са имали предходно лечение като деца, но зъбите им са се разместили отново.



In corporation with
Ocean Blue
PROJECT



СПАСИ ОКЕАНА

Всяка ClearX усмивка ще осигури премахването на 450гр пластмаса от Световния океан.