


- 3 В рамките на 3-5 работни дни ще получите проформа фактура на предоставената от Вас електронна поща. Ще откриете плана за лечение, включително и 3D симулацията, в нашия портал.

Как да получите безплатна първоначална оценка по снимки:

Създайте нов случай и прикачете фотоснимките на пациента. Посочете в раздела с коментари, че желаете да се направи САМО безплатна оценка.

- 4 След като обсъдите плана на лечение с пациента, моля да го потвърдите в нашия портал. Всякакви въпроси и коментари могат да бъдат добавени в полето за коментари.
- 5 След като потвърдите случая, са необходими около 10-12 работни дни плюс доставка за получаване на алайнерите до вашата клиника или практика.

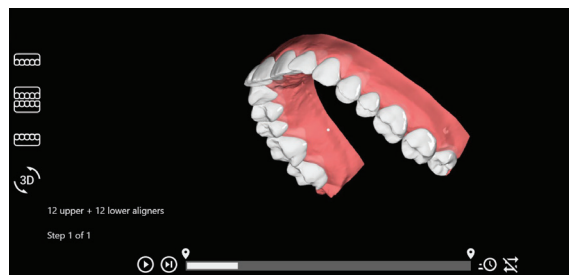

В рамките на 3-5 работни дни след получаване на цялата документация, ще можете да видите 3D симулацията в нашия портал и да я споделите с пациента си чрез електронна поща.

Прозрачните алайнери са персонализирани ортодонстски апарати, предназначени за изправяне на зъбите на конкретен пациент.

Имате въпроси?

Ние сме тук, за да помогнем!

Свържете се с нас на:

0884 503 444

info@clearx.bg



K LINE BULGARIA
Академик Йордан Трифонов 3
1700 София
България
www.clearx.bg

PROUDLY
MADE IN GERMANY

K CLEAR

Изготвяне на лечебен план



**K LINE
EUROPE**

Процедурата

- 1 **Регистрирайте се безплатно на нашия портал:**
www.kline-portal.com или ни изпратете регистрационна форма на info@clearx.bg

Вашият профил ще бъде активиран скоро след като завършите успешно регистрацията.
Вече може да започнете планирането на първия си случай!

- 2 **Прикачете необходимата информация:**



Информация за пациента



Фотодокументация



Ортопантомография

Ако не използвате интраорален скенер, моля изпратете ни добре опаковани отпечатъци с А-силикон на адрес:

K Line Bulgaria

ул. "Акад. Йордан Трифонов" 3
1700 София
0884 503 444



Отпечатъчните лъжици не се връщат.

Екстраорални снимки

Моля, прикачете снимките в съответната секция в портала:


- 1 Фронтална с усмивка
- 2 Фронтална без усмивка
- 3 Профил с усмивка
- 4 Профил без усмивка



Рентгенова снимка

- 1 Ортопантомография
- 2 Телерентгенография (по избор)

Интраорални снимки

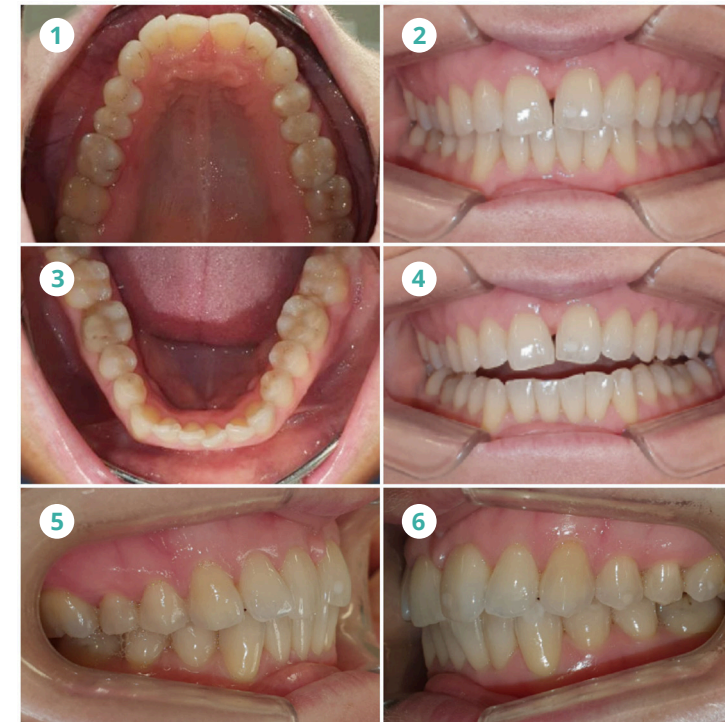

- 1 Оклюзален изглед на горна челюст
- 2 Фронтален изглед в захапка
- 3 Оклюзален изглед на долна челюст
- 4 Фронтален изглед без захапка
- 5 Директен страничен изглед вдясно
- 6 Директен страничен изглед вляво